

GENGIGEL®

FORTE

Mund-Gel

(AT)

Ideal für die Anwendung bei Wunden und in der postoperativen Phase. Speziell für die einfache, schnelle und effiziente Anwendung entwickelt. HMW-Hyaluronsäure ist insbesondere in den äussersten Schichten des gesunden Zahnfleischgewebes vorhanden, wo sie sowohl als Barriere dient als auch die Festigkeit des Parodontalbandes stärkt. HMW-Hyaluronsäure gilt als wesentlicher Faktor für die Gesunderhaltung des Zahnfleischgewebes. Hyaluronsäure besitzt eine Reihe von positiven Eigenschaften, die zu einer erfolgreichen Zahnbehandlung und Mundhygiene beitragen. Insbesondere kann Hyaluronsäure das 50-fache ihres eigenen Trockengewichts an Wasser absorbieren. Durch diese Eigenschaft und ihre molekulare Konformation, wenn sie in einer wässrigen Umgebung gelöst wird, wirkt die Hyaluronsäure als Barriere gegen das Eindringen von Mikroorganismen und anderen Toxinen, die wahrscheinlich zur Ätiologie von Parodontalerkrankungen beitragen. Auf diese Weise schafft die Hyaluronsäure eine sehr wirksame natürliche Barriere. Dank seiner schützenden Barrierewirkung wirkt Gengigel® Forte schmerzlindernd, fördert die natürliche Regeneration von Gewebe nach traumatischen Ereignissen wie Operationen, Implantaten, Zahnextraktionen, Wurzelbehandlungen usw. und fördert die Wasseraufnahme. Auf diese Weise werden Ödeme verringert und Entzündungen gelindert. Gengigel® Forte • enthält eine nicht-tierische, biotechnologisch hergestellte Quelle hochwertiger, hochreiner Hyaluronsäure in Form eines Natriumsalzes mit hohem Molekulargewicht • bietet eine lang anhaltende lokale Wirkung • bietet dank der besonderen Produktrezeptur eine gute Haftung auf der Schleimhaut • kann ohne Einschränkung von allen Patienten, einschliesslich Kindern, Schwangeren, älteren Menschen und Diabetikern, verwendet werden. **Indikationen** Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist Gengigel® Forte speziell indiziert für den Schutz der Schleimhaut bei: • tiefen Wunden am Zahnfleisch • entzündeten und/oder schmerzhaften Zonen nach Traumata, chirurgischen oder parodontalen Eingriffen, Zahnextraktionen oder subgingivalen Wurzelglättungen. **Gebrauchsanweisung** Unmittelbar nach der Zahnbehandlung tragen Sie mit der Kanüle eine kleine Menge Gel auf die betroffene Stelle auf oder massieren Sie es mit dem Finger (nach dem Händewaschen) in das Zahnfleisch, bis die betroffene Stelle vollständig bedeckt ist. Ein- oder zweimal täglich oder je nach Bedarf anwenden, vorbehaltlich anderer Anweisungen des Arztes. **Verpackung** Gengigel® Forte orales Gel, Tube 8 ml **Kontraindikationen** Gengigel® Forte sollte bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwendet werden. **Vorsichtsmassnahmen und Warnhinweise:** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Bei Raumtemperatur lagern und vor direkten Wärmequellen schützen. Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Vor dem Verschliessen der Tube nach dem Gebrauch sind alle Produktreste zu entfernen. Produkt nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn die Symptome fortbestehen, konsultieren Sie einen Arzt.

Composition: / Zusammensetzung / Composição / Compoziție / التركيب / Sastojci / Sestavine / İçerik / הרכב / Composizione / Composition:

Principal ingredient: / Hauptbestandteil / Ingrediente Principal / Principalul ingredient / المكون الرئيسي / Glavni sastojak / Glavna sestavina / Ana İçerik / מרכיב עיקרי / Ingrediente principale / Compozant principal: ■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Andere Inhaltsstoffe / Outros ingredientes / Alte componente / מרכיבים נוספים / Ostali sastojci / Ostale sestavine / Diğer içerikler / مكونات أخرى / Altri ingredienti / Autres composants: ■ Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide.

It may contain / Präparat kann / Pode conter / Poate conține / قد يحتوي على / Može sadržavati / Lahko vsebuje / içerebilir / עלול להכיל / Può contenere / Peut contenir de ■ Citric acid



0051



RICERFARMA s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricercarma.com
Made in EU

tube	cap	cannula	IFU	box
02 PE-HD	04 PE-LD	04 PE-LD	22 PAP	21 PAP
plastic			paper	

Medical Device Class II b
INTERNATIONAL PATENT

G27202-008-00DB v1
Release March 2021