

AT

Gengigel® Erste Zähnchen ist ein Gel, das aus einer innovativen patentierten schleim-haftenden Polymer-Matrix besteht, die lange an Zähnen und Zahnfleisch haftet und eine unsichtbare flexible, starke Schicht bildet, die einen effizienten Schutz bietet.

Anwendungsgebiet: Für Kinder typische Zahnfleischentzündungen, wie sie beim Zahnen oder bei Verletzungen vorkommen. Klinische Versuche beweisen, dass die Anwendung von **Gengigel® Erste Zähnchen** Schmerzen und Schwellungen reduziert und die Heilung beschleunigt.

Gebrauchsanweisung: Nach gründlichem Händewaschen eine geringe Menge des Gels mit dem Finger auf dem Zahnfleisch verteilen und behutsam einmassieren, bis die betroffene Stelle vollkommen bedeckt ist. Vorzugsweise nach dem Essen und vor dem Schlafengehen anwenden, um die Bildung des Films zu unterstützen und dadurch dem Kind längere Erleichterung zu verschaffen. 3-6x täglich oder bei Bedarf anwenden.

Mit der Anwendung von **Gengigel® Erste Zähnchen** kann der Einsatz von Medikamenten wie lokale Anästhetika reduziert werden; es hat einen angenehmen Geschmack und ist alkohol- und zuckerfrei. Es enthält keine künstlichen Geschmacksstoffe, Parabene, SLS oder GMOS. Für Babys klinisch getestet.

Kontraindikationen: **Gengigel® Erste Zähnchen** soll nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: Ein erkennbar beschädigtes Produkt soll nicht verwendet werden. Bei Raumtemperatur, zwischen 5° und 40° C, aufbewahren und vor direktem Wärmeeinfluss schützen. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Vor Verschließen der Packung alle Produktreste beseitigen. Das Produkt dient nur zum Eigenbedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls das Produkt gleichzeitig mit anderen Produkten angewendet wird, konsultieren Sie einen Arzt.

Composition: / Zusammensetzung: / Összetétel / Sestava / Sastav / Състав / Состав /

Principal ingredient: / Hauptinhaltsstoffe: / Fő összetevő: / Glavna sestavina: / Glavni sastojak: / Основна съставка: / Главна состојка: /

■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Sonstige Inhaltsstoffe: / Egyéb összetevők: / Druge sestavine: / Ostali sastojci: / Други съставки: / Други состојки: /

■ Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glycerol Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA.

It may contain ■ Lactic Acid, Sodium Hydroxide

MC200199SLO/F/F Release April 2019



RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT

www.ricerfarma.com

Made in EU