



GENGIGEL®

FORTE

Durch seine filmbildende Wirkung fördert GENGIGEL® PLUS FORTE die Zahnfleischgesundheit und beruhigt entzündetes Mundgewebe.

Gengigel® FORTE ist ein Medizinprodukt, das eine optimale Haftung und einen Schutz der Zahnfleischschleimhaut bietet. Seine Mischung verschiedener Polymere, verleihen ihm seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Biokompatibilität. Das Besondere seiner Rezeptur ist die Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht (HMW), die der natürlichen Hyaluronsäure im Zahnfleischgewebe ähnelt.

HMW-Hyaluronsäure befindet sich in besonders hoher Konzentration in den äusseren Schichten des gesunden Zahnfleischgewebes, wo sie sowohl eine Barrierefunktion besitzt als auch zur Festigkeit des parodontalen Ligaments beiträgt. Bei Parodontalerkrankungen und anderen Gewebetraumata (entzündliche Erkrankungen, Zahnfleischtaschen, Wunden usw.) steigt der Bedarf des Gewebes an Hyaluronsäure deutlich an (bis zu ca. 200% gegenüber den Basalwerten).

Dies unterstreicht ihren Wert für die Gesunderhaltung des Zahnfleisches. Klinische Studien zeigen, dass die Verfügbarkeit von exogener Hyaluronsäure mit ähnlichen Eigenschaften wie die der natürlich vorkommenden Hyaluronsäure dazu beiträgt, den natürlichen Heilungs- und Erholungsprozess des Gewebes zu unterstützen.

Gengigel® FORTE ist somit ein innovatives Produkt mit lang anhaltender, biotechnologisch hergestellte Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht. Hyaluronsäure fördert ein gesundes Feuchtigkeitgleichgewicht des Zahnfleischgewebes und eine schnellere Heilung, indem sie einen Mangel an natürlicher HMW-Hyaluronsäure im Zahnfleisch ausgleicht und ihre Wirkung verstärkt. Hyaluronsäure entfaltet keine lokalen oder systemischen pharmakologischen Wirkungen an der Schleimhaut.

Gengigel® FORTE bietet eine optimale Haftung, so dass die Hyaluronsäure (die ansonsten durch den ständigen Speichelaussfluss abgeführt würde) am Anwendungsort bleibt.

Gengigel® FORTE ist äusserst sicher, besitzt keine Gegenindikationen oder Nebenwirkungen und kann ohne Einschränkung von Kindern, Schwangeren und älteren Menschen verwendet werden. Die hohe Sicherheit von **Gengigel® FORTE** kommt besonders dann zum Tragen, wenn die Verwendung von Entzündungshemmenden Mitteln kontraindiziert ist. Aufgrund der Eigenschaften von Xylit, einem natürlichen Süsstoff, der weder Karies fördert noch signifikante Schwankungen des Blutzuckerspiegels verursacht, ist das Produkt potenziell auch für Diabetiker geeignet. Es sind keine Wechselwirkungen mit Medikamenten bekannt.

Indikationen: Schwere und schmerzhaft traumatische Zustände wie schwere Mundgeschwüre, orale Wunden oder Abschrüffungen, die durch Zahnextraktionen und chirurgische Eingriffe usw. verursacht wurden.

Gebrauchsanweisung: Nach korrekter Mundhygiene **Gengigel® FORTE** drei- bis fünfmal täglich (nach den Hauptmahlzeiten) über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen anwenden, bis alle Symptome verschwunden sind. Wir empfehlen, mindestens 30 Minuten nach der Anwendung nichts zu essen oder zu trinken.

Mundspülung: Spülen Sie mit 10 ml (eine Dosis) für 1-2 Minuten. Die Mischung ist gebrauchsfertig; nicht verdünnen. Inklusive Messbecher CE 0373.

Spray: Jeder Sprühstoss garantiert eine homogene, gleichmässige Verteilung der Flüssigkeit im Mundraum; 1 oder 2 Sprühstöße auf entzündetem oder traumatisiertem Gewebe. Halten Sie die Flasche senkrecht. Es sind keine Probleme nach versehentlichem Verschlucken des Produkts bekannt.

Zusammensetzung

Hauptwirkstoff: Natriumhyaluronat

Sonstige Bestandteile:

Mundspülung: Aqua, Xylitol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Sodium Phosphate, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl Alcohol, Trisodium Phosphate, Aroma, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Disodium Edta, Glycerophosphocholine. Kann Zitronensäure enthalten.

Spray: Aqua, Xylitol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Sodium Phosphate, Dichlorobenzyl Alcohol, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium Edta, Polyvinyl Alcohol, PVP, Sodium Saccharin, Glycerophosphocholine, Aroma, Carbomer (Polycarbophil), PVM/MA Copolymer. Kann Milchsäure, Natriumhydroxid enthalten.

Gegenanzeigen: Die Verwendung von **Gengigel® FORTE** sollte bei einer Überempfindlichkeit gegen seine Bestandteile unterbleiben.

Sicherheitshinweise und Warnungen: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Bei Raumtemperatur, zwischen 5°C und 40°C lagern; vor direkten Wärmequellen schützen. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Vor dem Verschlüssen der Packung nach Gebrauch alle Produktreste entfernen und den Messbecher ausspülen. Produkt nur für den persönlichen Gebrauch. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn die Symptome andauern, wenden Sie sich an einen Arzt.

G20201-000-00/B
Release March 2021



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

